




United[®]
Orthopedic Corporation

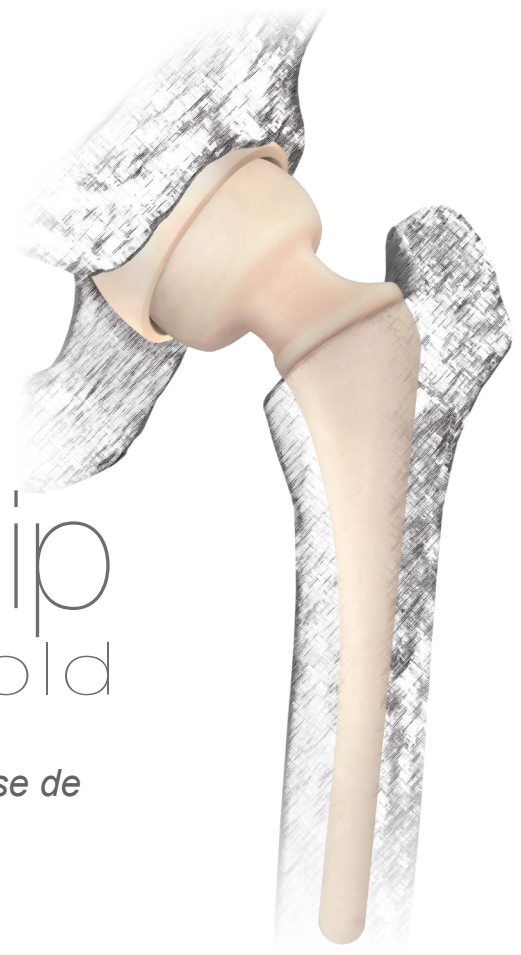

RepliCase[™] • Hip Cement Spacer Mold

Un kit d'instruments qui reproduit facilement la prothèse de hanche


- Cette prothèse totale de hanche en ciment empêche la luxation
- 3 tailles sont disponibles
- Moules fabriqués en silicone de qualité médicale pour permettre une stérilisation multiple



Procédure chirurgicale

1. Selection de la taille

Taille cotyle mesurée	50, 52	54	56 ou plus
Taille suggérée	S	M	L

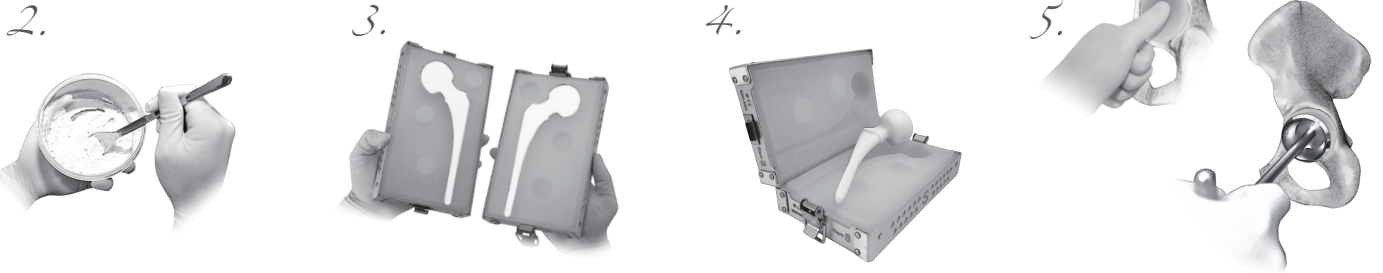


*Note: Le ciment et les antibiotiques ne sont pas fournis.

Pour une taille de cotyle en dessous de 50 mm, le moule n'est pas nécessaire, la sélection de la taille doit être basée sur le diamètre de la tête. Au moins deux lots de ciment osseux sont nécessaires pour la réalisation du kit. La quantité de ciment osseux requise pour la cupule dépend de la taille du cotyle et du defect osseux.

Specifications

Size	S	M	L
Diamètre cupule(mm)	46	49	52
Diamètre de la Tête(mm)	42	45	48
Offset (mm)	36	39	43
Angle tête/col	130°	130°	130°
Longueur de la tige(mm)	145	145	145
Diamètre distal(mm)	9	10	11

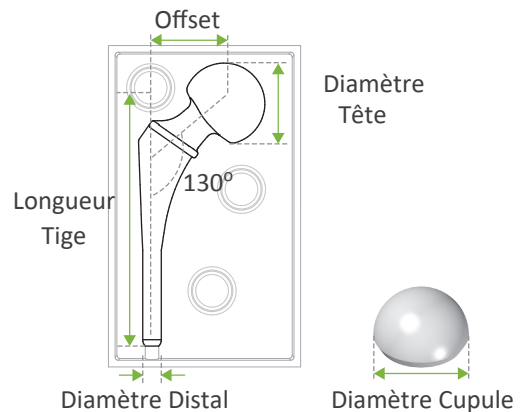

Order Information

RepliCase™ · Hip Cement Spacer Mold



Catalog No.	Description
9909-5009	S, 42 mm
9909-5010	M, 45 mm
9909-5011	L, 48 mm

Catalog No.	Description
9909-8110	Kit Replicase



Catalog No.	Description
9909-1101	Manche pour moule cupule acétabulaire

Catalog No.	Description
9909-5046	Moule cupule acétabulaire, 46 mm
9909-5049	Moule cupule acétabulaire, 49 mm
9909-5052	Moule cupule acétabulaire, 52 mm



Office

■ Taiwan

12F, No. 80, Sec. 1, Chengong Rd, Yonghe Dist.,
New Taipei City 23452, Taiwan
Tel: +886 2 2929-4567 Fax: +886 2 2922-4567

■ USA

UOC USA Inc.
20 Fairbanks, Suite 173
Irvine, CA 92618
Tel: +1 949-328-3366 Fax: +1 949-328-3367

■ China

United Medical Instrument Co. Ltd.
Room 3-1-201, No.45, Jiangchang First Road, Shanghai, China
Tel: +86 21 3661-8055 Fax: +86 21 6628-3031

■ UOC Suisse

Avenue du Général Guisan 60 A-1009 Pully-Suisse
Tel: 079 138 70 70- www.uoc-swiss.ch



www.uoc.com.tw

All Rights Reserved, ©2015 United Orthopedic Corp.